


产品使用范围

- 1. 供医疗单位作急救给氧和对缺氧病人进行氧气吸入用。
- 2. 主要零部件名称、数量：见表格，结构示意图。
- 3. 主要性能参数：
 - 3-1 氧气流量调节范围：1~10L/min, 1~15L/min;
 - 3-2 减压阀出厂时调节压力：0.2~0.3Mpa;
 - 3-3 安全阀自动泄压压力：0.35±0.05Mpa。
- 4. 使用方法：
 - 4-1 向潮化瓶内注入适量蒸馏水或冷开水、至水位线；
 - 4-2 把大螺帽2拧在氧气瓶阀的出口接头上，使压力表、流量计处于垂直向上；
 - 4-3 关闭流量开关8，打开氧气瓶阀开关。从压力表4上读出氧气瓶内氧气压力数值。逆时针旋转流量开关8，根据吸氧者需要调至合适流量（流量值从流量计内浮子7之中心读取）。
 - 4-4 将吸氧管插入输气管的接头上，按4-3进行吸氧。
- 5. 注意事项
 - 5-1 必须确保氧气瓶内充装的是医用氧，压力不大于15Mpa；
 - 5-2 吸氧管为一次性使用；
 - 5-3 使用前，应检查各部是否完好，并以干净布擦拭；
 - 5-4 压力表、氧气瓶、吸入器绝对禁油，以防发生意外爆炸；
 - 5-5 潮化瓶内加的水必须保持干净并经常更换；
 - 5-6 各个构件不得随意调动，正常吸氧时应注意观察流量；
 - 5-7 安全阀5起安全保险作用，有故障时螺母上三孔自动泄压，使用时不可贴堵各孔；
 - 5-8 吸氧时，请注意观察流量计显示的流量大小，防止氧气流量过大，而引起人体不良反映；
 - 5-9 发现故障时应请专业单位检修，或送本公司维修及本公司驻外地维修部修理，禁止自行拆装；
- 6. 质量承诺
顾客使用本产品半年内（凭发票之日算起）出现质量问题，厂家负责保修，（不包括使用不当造成损坏）产品终身保修。
- 7. 注意事项
 - 7-1 本产品严禁用于氧气雾化吸入治疗
 - 7-2 根据使用情况建议定期检测。
 - 7-3 每使用一年后，建议到当地计量部门或发回本公司检测合格后继续使用
 - 7-4 经包装的浮标式氧气吸入器，在遵守储运和贮存规则的条件下，有效期三年
- 生产许可证：浙食药监械生产许20130170号
- 生产备案号：浙甬食药监械生产备20140001号
- 产品备案号：浙甬械备20140059号
- 计量许可证：浙制02810332号
- 修订日期：2016年7月1日

注：各零件未按比例画，部分零件省略。


9-12	泡沫滤块	I	
9-11	导气管	I	
9-10	加湿杯	I	
9-9	加湿杯压封垫	I	
9-8	加湿杯盖	I	
9-7	O型圈C	I	
9-6	压盖	I	
9-5	O型圈B	I	
9-4	连接体	I	
9-3	O型圈B	I	
9-2	斗型密封垫	I	
9-1	输气管	I	
9	加湿器	I	
8	流量开关	I	
7	流量计浮子	I	从浮子中心读值
6	流量计	I	
5	安全阀	I	
4	氧压力表	I	禁油
3-5	尾筒	I	
3-4	O型密封圈F	I	
3-3	O型密封圈G	I	
3-2	活塞	I	
3-1	安全阀调压弹簧	I	
3	减压阀	I	
2	大螺帽	I	
1-2	过滤块	I	
1-1	接嘴	I	接于氧气瓶上
序号	名称	数量	备注

YOF-LA结构示意图

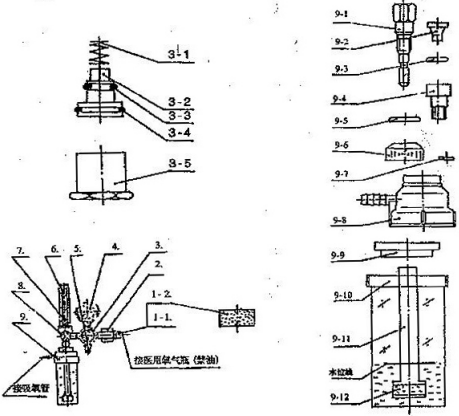

Y0F-LA系列浮标式氧气吸入器

使用说明书

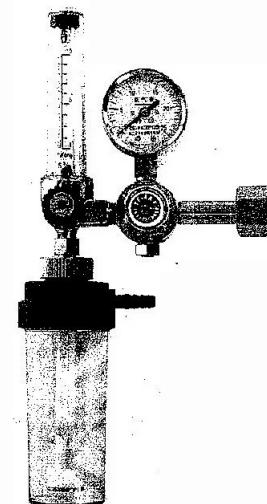

安徽摩菲自动化仪表有限公司

电话：0550-7316502 传真：7311002

手机号码：13855094605（微信同号）

网址：<http://www.mofeigroup.com>